

# OPAS ONNISTUNEeseen MONITEHOSOVITUKSEEN




## ACUVUE® -MONITEHOSOVITUSLASKURI

Käy ACUVUE®-moniteholaskurissa kokeilemassa nopeaa ja helppoa linssin valintaa ja sovitusta



[jnvisioncare.fi/5minfit](http://jnvisioncare.fi/5minfit)

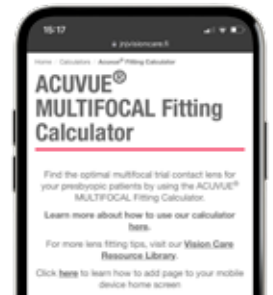

LINSSITIEDOT	1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL	ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL 2-WEEKLY	ACUVUE® OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL
Materiaali	Etafilcon A	Senofilcon A	Senofilcon A
Halkaisija	14.3 mm	14.3 mm	14.3 mm
Kaarevuus	8.4 mm	8.4 mm	8.4 mm
Kostutusaine	Sisäänrakennettu PVP <sup>+</sup> LACREON® teknologialla	Sisäänrakennettu PVP <sup>+</sup> HYDRACLEAR® PLUS teknologialla	Sisäänrakennettu PVP <sup>+</sup> TearStable™ teknologialla
Keskimääräinen UV-esto <sup>*</sup>	Luokka 2	Luokka 1	Luokka 1
Sinivioletti-valonsuodatin	Ei	Ei	OptiBlue™ Light Filter <sup>*</sup>
Hapenläpäisy Dk/t <sup>#</sup>	25.5 x 10 <sup>-9</sup>	147 x 10 <sup>-9</sup>	147 x 10 <sup>-9</sup>
Käsittelyväri	Kyllä	Kyllä	Kyllä   Sinivihreä <sup>2</sup>
Voimakkuusrajat	-9.00D - +6.00D (0.25D välein)	-9.00D - +6.00D (0.25D välein)	-9.00D - +6.00D (0.25D välein)
ADD	LOW +0.75D - +1.25D MID +1.50D - +1.75D HIGH +2.00D - +2.50D	LOW +0.75D - +1.25D MID +1.50D - +1.75D HIGH +2.00D - +2.50D	LOW +0.75D - +1.25D MID +1.50D - +1.75D HIGH +2.00D - +2.50D



# Onnistut sovituksessa käyttämällä opasta

## ENSIMMÄISEN LINSSIN VALINTA

1

### Määritä sfäärinen korjaus (Best Vision Sphere, BVS)

Tee uusi subjektiivinen refraktio<sup>o</sup>, poista sylinterivoimakkuus ja määritä pienin mahdollinen miinuskorjaus miellyttävään kaukonäköön.<sup>oo</sup>

2

### Määritä sensorinen dominoiva silmä.

Suosittelaaan käyttämään +1.00 D sumutustekniikkaa havainnointimenetelmän sijaan.

3

### Määritä pienin mahdollinen lähilisiä potilaan tarpeiden perusteella.

Kun sfäärinen kaukokorjaus on selvillä, määritä pienin mahdollinen toiminnallinen lähilisiä (ADD)

**Vinkki:** aloita laittamalla kaukovoimakkuuden päälle 0.50 pienempi lähilisiä kuin silmälaseissa ja lisää tarvittaessa 0.25 askelin, kunnes hyväksyttävä lähinäkö on saavutettu.

4

### Valitse linssi taulukon mukaan

ADD	Ensimmäinen linssivalinta		Kaukonäön parannus		Lähinäön parannus	
	Dominantti silmä	Ei-dominantti silmä	Dominantti silmä	Ei-dominantti silmä	Dominantti silmä	Ei-dominantti silmä
+0.75:stä +1.25:een			Käytä sfääristä ACUVUE® linssiä			 Lisää +0.25D kaukokorjaukseen
+1.50:stä +1.75:een						 Lisää +0.25D kaukokorjaukseen
+2.00:sta +2.50:een				 Lisää +0.25D kaukokorjaukseen		 Lisää +0.25D kaukokorjaukseen

# Oxygen transmissibility at centre of a -3.00D lens using boundary-corrected, edge-corrected Dk values. Units: (cm/sec) (ml O<sub>2</sub>/ml x mm Hg) at 35oC. Dk determined via polarographic method.

- Näkyvän HEV valon suodatuksella piilolinseissä ei ole osoitettu olevan edistävää vaikutusta käyttäjän systeemiseen ja/tai silmien terveyteen. Kysy lisää silmäasiantuntijalta.

\* Kaikissa ACUVUE® Brand Contact Lenses piilolinseissä on UV-suojaa, joka auttaa suojelemaan sarveiskalvoa ja silmää haitalliselta UV-säteilyltä.

UV-säteilyä suodattavia linsejä Ei ole tarkoitettu korvaamaan varsinaisia UV-suojavia laseja tai aurinkolaseja, koska ne eivät täysin peitä silmää ja sitä ympäröiviä alueita. UV-säteily mitattiin -1.00 D linssi.

<sup>o</sup> Jatka, jos hajataittoa on -0.75D tai vähemmän. <sup>oo</sup>Tee pintavälimuutos kaukokorjaukseen.

ACUVUE®, 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL, ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL, ACUVUE® OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL®, LACREON®, HYDRACLEAR®, OptiBlue™ ja TearStable™ ovat Johnson & Johnson yhtiön tuotemerkkejä.

© Janssen Cilag OY 2023.

Lisätietoja asianmukaisesta käytöstä, hoidosta ja turvallisuudesta löydät käyttöohjeista tai J&J:n verkkosivustolta [www.jnjvisioncare.fi](http://www.jnjvisioncare.fi). PP2023MLT4669 v2.0

Johnson & Johnson VISION